

Allgemeine Pflegehinweise:

Bitte vermeiden Sie es den Polsterteil an scharfen Ecken anstoßen zu lassen.

Reinigung und Desinfektion:

Generell reicht im Normalfall die Reinigung mit einer milden, warmen Seifenlauge aus.

Folgende Desinfektionsmittel sind zur Reinigung an dem Bezugstoff getestet und empfohlen.

megro GmbH & Co. KG	megroCid	5%ig
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes	5%ig
Dr. Schumacher GmbH	Optisept	7%ig
Dr. Schumacher GmbH	Biguanid Fläche N	3%ig
B.Braun Deutschland GmbH Co. KG	Hexaquant lemon fresh	2%ig
B.Braun Deutschland GmbH Co. KG	Meliseptol foam pure	unverdünnt
B.Braun Deutschland GmbH Co. KG	Meliseptol rapid	unverdünnt
Franken Chemie GmbH	Franco-Cid N	0,25%ig
Franken Chemie GmbH	Dessan 2	0,25%ig
Dürr Dental AG	FD 300	1%ig
Dürr Dental AG	FD 366	unverdünnt
Schülke & Mayr GmbH	Antifect plus	0,5 %ig
Schülke & Mayr GmbH	Buraton	3 %ig
Aquagenius Schweiz GmbH	ASCEA-des	unverdünnt
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Lysoformin Spezial	0,75%ig
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Aldasan 2000	4 %ig
Desomed Dr. Trippen GmbH	Desomed rapid AF	unverdünnt
Tana Chemie GmbH	Apesin rapid	3 %ig
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin extra	4 %ig
CosiMed	CosiMed	7,5%ig

NICHT zu empfehlen sind! :	
Schülke & Mayr GmbH	Perform 3 %ig
BODE Chemie GmbH	Microbac forte 3 %ig
Dürr Dental AG	FD 360 unverdünnt
Schülke & Mayr GmbH	Mikrozyd sensitive liquid unverdünnt
Ecolab GmbH	Incidin liquid unverdünnt