


Montageanleitung & Pflegehinweise

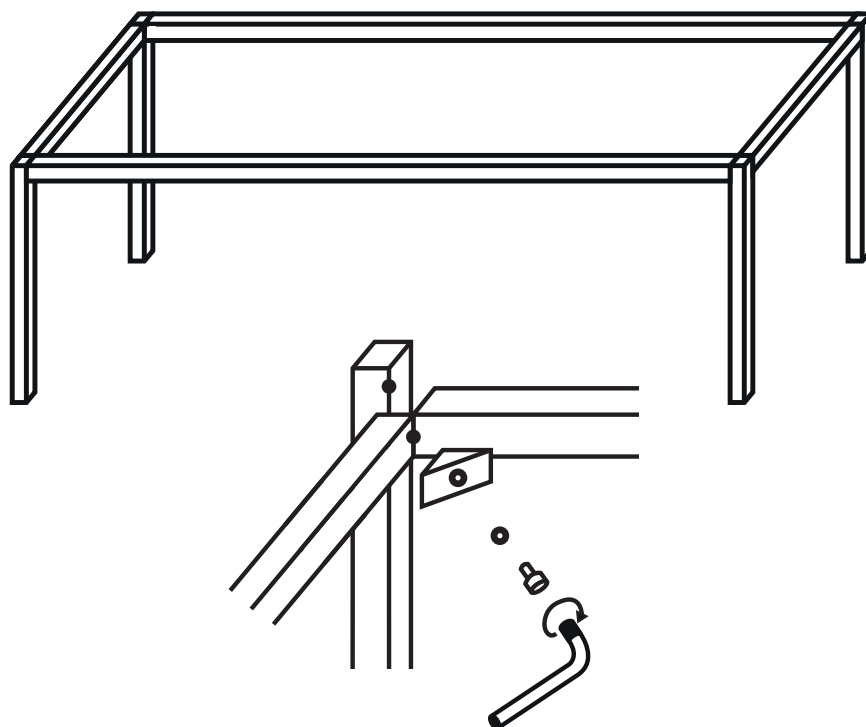

Inhalt der Zubehörpackung: 4 x Gusswinkel, 4 x Federring 8,1 mm, 4 x Inbusschraube 8 x 55, Qualität 8.8, 1 x Sechskant-Winkel-Werkzeug, 6 mm (ISO 2936L 35x180 mm) zum **kräftigen Festziehen** der Inbusschrauben.

ACHTUNG! Schrauben immer erst leicht von Hand einschrauben. Bei Liegen mit Längs-u. Querriegel: Füße erst nur locker anziehen. Längs-u.Querriegel fest zwischen den Füßen montieren. Schrauben dann **richtig kräftig** anziehen.

Füße dürfen nicht wackeln. Falls im Laufe der Zeit die Liege zu wackeln beginnt, Schrauben der Füße **sofort nachziehen**. Bodengleiter Höheneinstellung überprüfen und notfalls nachjustieren.

Allgemeine Sicherheits-, Nutzungs-, und Pflegehinweise

NUTZUNGS-Einschränkung: Das Kopfteil ist **nicht zum Sitzen** gedacht!

Nicht ohne Aufsicht bei: Kindern sowie Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen Behinderungen oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung. Personal muss in dem Umgang mit solchen Personen unterrichtet sein.

Max.Liegen-Tragkraft: 220kg

Liege nur tragend bewegen und am Rahmen anheben. Bei Bedarf, zur Erhöhung der Standsicherheit auf rutschigen Untergründen, gibt es Nivellierschrauben mit Anti-Rutsch-Gummis.

Zur **normalen Reinigung** reicht **lauwarme Seifenlauge** aus. Spezielle Reiniger: an nicht sichtbarer Stelle testen! Eine Liste getesteter Desinfektionsmittel ist beigelegt.

Vertrieb: **megro GmbH & Co. KG** • Am Schornacker 30 • 46485 Wesel • Germany • www.megro.de

 **UHUMED** • Ulrich Huperz • Röntgenstr. 8 • 57439 Attendorn • Germany • www.uhumed.com